

## VINCENKA® nosní sprej JUNIOR hypotonický

Pro novorozence a malé děti (0+ měsíců).

- poloviční dávka\*
- nižší tlak rozprašovače\*
- užší konec aplikátoru\*

**Zdravotnický prostředek pro ošetření sliznice nosní dutiny a nosohltanu, který pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice a příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích, chronické rinitidy, sinusitidy a chronické polypózní nasopharyngitidy; u dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobronchitidy a rinitidy.**

**Složení:** Minerální voda z přírodního léčivého zdroje, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhlíčitá, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická, odželezněná.

### Chemická analýza po odželeznění:

Kationty	(mg/l)	Anionty	(mg/l)	Neдисociované složky	(mg/l)
Li+	8,62	F-	2,69	HBO <sup>2+</sup>	266
Na+	2 360	Cl-	1 610	<b>Celková mineralizace</b>	<b>9 132 (mg/l)</b>
K+	127	I-	6,38	pH	6,6
Ca <sup>2+</sup>	235	HCO <sub>3</sub>	4 470	Odželezněno	
Ba <sup>2+</sup>	6,11				

Chemickou analýzu zdroje BJ 305- NOVÁ VINCENKA® provedly RL PLZ MZ ČR Karlovy Vary 8. 4. 2022.

**Použití:** Pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice (funkci řasinkového epitelu), umožňuje optimální fungování tzv. slizniční imunity jako primární obrany před infekcí. Používá se pro zvlhčení sliznice celé nosní dutiny a nosohltanu především při pobytu v prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu, v prostorách vytápěných ústředním topením a prostředí znečištěném zejména prachovými částicemi. Celkovým složením hypotonické kyselky s obsahem jodidů příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích, chronické rinitidy, sinusitidy a chronické polypózní nasopharyngitidy. U dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobronchitidy a rinitidy. Aplikace přípravku je vhodná i při stavech po operacích nosních mandlí. Doporučuje se též proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejich recidiv. Je bezpečný při dlouhodobém použití a není návykový.

**Použití u dětí od 0 do 6 měsíců:** Použití nosního aplikátoru u dětí mezi 0. a 6. měsícem může být nahrazeno použitím kapátka (není součástí balení) v případech, kdy dítě hůře snáší sprejovou aplikaci pomocí nosního aplikátoru. Před použitím kapátka, odšroubujte nosní aplikátor a naberte potřebné množství obsahu (max. 1 ml) a aplikujte do každé nosní díry 1 kapku. Lahvičku ihned uzavřete nosním aplikátorem. Nespotebované množství obsahu v kapátku nevracejte zpět do lahvičky nosního spreje.

**Dávkování:** 1 – 2 vstříky do každé nosní díry tak často, jak je potřeba (denní dávka není omezena). 1 vstřík = 0,05 ml.

**Pokyny k použití:** Sejměte žlutý ochranný kryt z aplikátoru spreje a před prvním použitím několikrát stlačte manžetu po obvodu aplikátoru, dokud se nezačne tvořit aerosol. Začněte používat běžným způsobem. Po každém použití aplikátor očistěte a nasadte ochranný kryt. Při používání nosního spreje ve vodorovné poloze (např. u ležících dětí) je nutné mezi každou dávkou provést aplikaci jedním stisknutím aplikátoru do volného prostoru ve svislé poloze nosního spreje.

**Upozornění:** Skladujte v suchu a temnu při teplotě od 0°C do 25°C. Po prvním použití spotřebujte do 6 týdnů. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Vysoký obsah minerálních solí v nosním spreji může způsobit usazování krystalků solí na dně lékovky, které však nesnižují kvalitu obsahu. Tyto krystalky mohou způsobit ucpaní mechanismu rozprašovače (aplikátoru). V tomto případě je možné odšroubovat aplikátor ze skleničky a ponořit sací hadičku do sklenice s teplou vodou. Aplikátor několikrát stlačte, tak aby došlo k nasání vody a pročištění aplikátoru.

**Balení:** 25 ml v hnědé skleněné lékovce s mechanickým nosním rozprašovačem s ochrannou krytkou.

**Datum poslední revize textu:** 1. 6. 2023

\*Oproti standardnímu provedení

CE<sub>1023</sub>

**Výrobce:**

VINCENKA a.s., Lázeňské náměstí 165  
763 26 Luhačovice, Česká republika



0°C/25°C

Omezení skladovací teploty

LOT

Číslo šarže



Použití do data

MD

Zdravotnický prostředek



Výrobce



Čtěte návod k použití

[www.vincenka.cz](http://www.vincenka.cz)

# Nosový sprej Junior

NA PREVENCIU OCHORENÍ  
NOSOVEJ SLIZNICE  
HYPOTONICKÝ

SK

## VINCENTKA® nosový sprej JUNIOR hypotonický

Pre novorodencov a malé deti (0+ mesiacov).

- Polovičná dávka\*
- Nižší tlak rozprašovača\*
- Užší koniec aplikátora\*

**Zdravotnícka pomôcka na ošetrovanie sliznice nosovej dutiny a nosohltana, ktorá pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice a priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy, sínusitídy a chronickej polypózne nazofaryngitídy; u detí pôsobí preventívne proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy.**

**Zloženie:** Minerálna voda z prírodného liečivého zdroja, veľmi silne mineralizovaná, jódová, uhličitá, hydrogénuhličitano-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická, odželeznená.

### Chemická analýza po odstránení železa:

Chemickú analýzu zdroja BJ 305- NOVÁ VINCENTKA® vykonala RL PLZ MZ ČR Karlovy Vary 8. 4. 2022.

Katióny	(mg/l)	Anióny	(mg/l)	Ne-disociované zložky	(mg/l)
Li+	8,62	F-	2,69	HBO2+	266
Na+	2 360	Cl-	1 610	<b>Celková mineralizácia</b>	<b>9 132 (mg/l)</b>
K+	127	I-	6,38	pH	6,6
Ca2+	235	HCO3	4 470	Odželeznené	
Ba2+	6,11				

**Použitie:** Pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice (funkciu riasinkového epitelu), umožňuje optimálne fungovanie tzv. sliznicovej imunity ako primárnej obrany pred infekciou. Používa sa na zvlhčenie sliznice celej nosovej dutiny a nosohltana predovšetkým pri pobyte v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, v priestoroch vykurovaných ústredným kúrením a prostredí znečistenom najmä prachovými časticami. Celkovým zložením hypotonického kyselky s obsahom jodidov priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy, sínusitídy a chronickej polypózne nazofaryngitídy. U detí pôsobí preventívne proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy. Aplikácia prípravku je vhodná aj pri stavoch po operáciách nosových mandlí. Odporúča sa tiež proti vzniku suchých zápalov nosovej sliznice a na prevenciu ich recidív. Prípravok je bezpečný pri dlhodobom používaní a nie je návykový.

**Použitie u detí od 0 do 6 mesiacov:** Použitie nosového aplikátora u detí vo veku 0 až 6 mesiacov je možné nahradiť použitím kvapkadla (nie je súčasťou balenia) v prípadoch, keď dieťa horšie znáša sprejovú aplikáciu pomocou nosového aplikátora. Pred použitím kvapkadla odskrutkujte nosový aplikátor, naberte potrebné množstvo obsahu (max. 1 ml) a aplikujte do každej nosnej dierky 1 kvapku. Flaštičku ihneď uzavrite nosovým aplikátorom. Nespotrebované množstvo obsahu v kvapkadle nevracajte späť do flaštičky nosového spreja.

**Dávkovanie:** 1 – 2 vstreknutia do každej nosnej dierky podľa potreby (denná dávka nie je obmedzená). 1 vstreknutie = 0,05 ml.

**Pokyny na použitie:** Zložte modrý ochranný kryt z aplikátora spreja a pred prvým použitím niekoľkokrát stlačte manžetu po obvode aplikátora, kým sa nezačne tvoriť aerosól. Začnite používať bežným spôsobom. Po každom použití aplikátor očistite a nasadte ochranný kryt. Pri používaní nosového spreja vo vodorovnej polohe (napr. u ležiacich detí) je nutné medzi každou dávkou aplikovať prípravok jedným stlačením aplikátora do voľného priestoru vo zvislej polohe nosového spreja.

**Upozornenie:** Uchovávajte v suchu a tme pri teplote 0 °C až 25 °C. Po prvom použití spotrebujte do 6 týždňov. Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí. Vysoký obsah minerálnych solí v nosovom spreji môže spôsobiť usadzovanie kryštálikov solí na dne liekovky, ktoré však neznižujú kvalitu obsahu. Tieto kryštáliky môžu spôsobiť upchatie mechanizmu rozprašovača (aplikátora). V takom prípade je možné odskrutkovať aplikátor z flaštičky a ponoriť nasávaciu hadičku do pohára s teplou vodou. Aplikátor niekoľkokrát stlačte tak, aby došlo k nasatiu vody a prečisteniu aplikátora.

**Balenie:** 25 ml v hneď sklenenej liekovke s mechanickým nosovým rozprašovačom s ochranným krytom.

**Dátum poslednej revízie textu:** 1. 6. 2023

\*Oproti štandardnému vyhotoveniu

CE 1023

**Výrobca:**  
VINCENTKA a.s., Lázeňské náměstí 165  
763 26 Luhačovice, Česká republika

25°C Obmedzenie teploty skladovania **LOT** Číslo šarže

 Použiť do dátumu **MD** Zdravotnícka pomôcka

 Výrobca  Prečítajte si návod na použitie

[www.vincentka.cz](http://www.vincentka.cz)