

Nosní sprej Standard

K PREVENCI ONEMOCNĚNÍ
NOSNÍ SLIZNICE
HYPOTONICKÝ

CZ

VINCENTKA® nosní sprej STANDARD hypotonický

Zdravotnický prostředek pro ošetření sliznice nosní dutiny a nosohltanu, který pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice a který příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích, chronické rhinitidy, sinusitidy a chronické polypózní nasopharyngitidy; u dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobronchitidy a rhinitidy.

Složení:

Minerální voda z přírodního léčivého zdroje, velmi silně mineralizovaná, jódová, uhličitá, hydrogenuhličitano-chlorido-sodného typu, se zvýšeným obsahem fluoridů a kyseliny borité, studená, hypotonická, odželezněná.

Chemická analýza po odželeznění:

Kationty	(mg/l)	Anionty	(mg/l)	Nedisociované složky	(mg/l)
Li ⁺	8,62	F ⁻	2,69	HBO ₂ ⁺	266
Na ⁺	2 360	Cl ⁻	1 610	Celková mineralizace 9 132 (mg/l)	
K ⁺	127	I ⁻	6,38	pH	6,6
Ca ²⁺	235	HCO ₃	4 470	Odželezněno	
Ba ²⁺	6,11				

Chemickou analýzu zdroje BJ 305- NOVÁ VINCENTKA® provedly RL PLZ MZ ČR Karlovy Vary 8. 4. 2022.

Použití:

Pomáhá udržovat fyziologickou čistící schopnost nosní sliznice (funkci řasinkového epitelu), umožňuje optimální fungování tzv. slizniční imunity jako primární obrany před infekcí. Používá se pro zvlhčení sliznice celé nosní dutiny a nosohltanu především při pobytu v prostředí s nízkou relativní vlhkostí vzduchu, v prostorách vytápěných ústředním topením a prostředí znečištěném zejména prachovými částicemi. Celkovým složením hypotonické kyselky s obsahem jodidů příznivě ovlivňuje obranyschopnost ve smyslu prevence chronických bakteriálních infekcí horních cest dýchacích, chronické rhinitidy, sinusitidy a chronické polypózní nasopharyngitidy. U dětí preventivně působí proti rozvoji recidivující tracheobronchitidy a rhinitidy. Aplikace přípravku je vhodná i při stavech po operacích nosních mandlí. Doporučuje se též proti vzniku suchých zánětů nosní sliznice a k prevenci jejich recidiv. Je bezpečný při dlouhodobém použití a není návykový.

Dávkování:

1 – 2 vstříky do každé nosní dírky tak často, jak je třeba (denní dávka není omezena). 1 vstřík = 0,1ml.

Pokyny k použití:

Sejměte modrý ochranný kryt z aplikátoru spreje a před prvním použitím několikrát stlačte manžetu po obvodu aplikátoru, dokud se nezačne tvořit aerosol. Začněte používat běžným způsobem. Po každém použití aplikátor očištěte a nasadte ochranný kryt.

Upozornění:

Nevhodné pro děti do 3 let. Skladujte v suchu a temnu při teplotě od 0°C do 25°C. Po prvním použití spotřebujte do 6 týdnů. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Vysoký obsah minerálních solí v nosním spreji může způsobit usazování krystalků solí na dně lékovky, které však nesnižují kvalitu obsahu. Tyto krystalky mohou způsobit ucpaní mechanismu rozprašovače (aplikátoru). V tomto případě je možné odšroubovat aplikátor ze skleničky a ponořit sací hadičku do sklenice s teplou vodou. Aplikátor několikrát stlačte, tak aby došlo k nasání vody a pročištění aplikátoru.

Balení:

25 ml v hnědé skleněné lékovce s mechanickým nosním rozprašovačem s ochrannou krytkou.

Datum poslední revize textu: 1. 6. 2023

CE₁₀₂₃

Výrobce:

VINCENTKA a.s., Lázeňské náměstí 165
763 26 Luhačovice, Česká republika

www.vincentka.cz



Omezení skladovací teploty

LOT

Číslo šarže

Použití do data

MD

Zdravotnický prostředek



Výrobce



Čtěte návod k použití

Nosový sprej Standard

NA PREVENCIU OCHORENÍ
NOSOVEJ SLIZNICE
HYPOTONICKÝ

SK

VINCENTKA® nosový sprej ŠTANDARD hypotonický

Zdravotnícka pomôcka na ošetrovanie sliznice nosovej dutiny a nosohltana, ktorá pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice a priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy, sínusitídy a chronickej polypózne nazofaryngitídy; u detí pôsobí preventívne proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy.

Zloženie:

Minerálna voda z prírodného liečivého zdroja, veľmi silne mineralizovaná, jódová, uhľičitá, hydrogenuhličitan-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom fluoridov a kyseliny boritej, studená, hypotonická, odželeznená.

Chemická analýza po odstránení železa:

Katióny	(mg/l)	Anióny	(mg/l)	Nedisociované zložky	(mg/l)
Li+	8,62	F-	2,69	HBO ₂ ⁺	266
Na+	2 360	Cl-	1 610	Celková mineralizácia 9 132 (mg/l)	
K+	127	I-	6,38	pH	6,6
Ca ²⁺	235	HCO ₃	4 470	Odželeznené	
Ba ²⁺	6,11				

Chemickú analýzu zdroja BJ 305- NOVÁ VINCENTKA® vykonala RL PLZ MZ ČR Karlovy Vary 8. 4. 2022.

Použitie:

Pomáha udržiavať fyziologickú čistiacu schopnosť nosovej sliznice (funkciu riasinkového epitelu), umožňuje optimálne fungovanie tzv. sliznicovej imunity ako primárnej obrany pred infekciou. Používa sa na zvlhčenie sliznice celej nosovej dutiny a nosohltana predovšetkým pri pobyte v prostredí s nízkou relatívnou vlhkosťou vzduchu, v priestoroch vykurovaných ústredným kúrením a prostredí znečistenom najmä prachovými časticami. Celkovým zložením hypotonickej kyselky s obsahom jodidov priaznivo ovplyvňuje obranyschopnosť v zmysle prevencie chronických bakteriálnych infekcií horných dýchacích ciest, chronickej rinitídy, sínusitídy a chronickej polypózne nazofaryngitídy. U detí pôsobí preventívne proti rozvoju recidivujúcej tracheobronchitídy a rinitídy. Aplikácia prípravku je vhodná aj pri stavoch po operáciách nosových mandlí. Odporúča sa tiež proti vzniku suchých zápalov nosovej sliznice a na prevenciu ich recidív. Prípravok je bezpečný pri dlhodobom používaní a nie je návykový.

Dávkovanie:

1 – 2 vstreknutia do každej nosnej dierky podľa potreby (denná dávka nie je obmedzená).
1 vstreknutie = 0,1 ml.

Pokyny na použitie:

Zložte modrý ochranný kryt z aplikátora spreja a pred prvým použitím niekoľkokrát stlačte manžetu po obvode aplikátora, kým sa nezačne tvoriť aerosól. Začnite používať bežným spôsobom. Po každom použití aplikátor očistite a nasadte ochranný kryt.

Upozornenie:

Nevhodné pre deti do 3 rokov. Uchovávať v suchu a tme pri teplote 0 °C až 25 °C. Po prvom použití spotrebujte do 6 týždňov. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Vysoký obsah minerálnych solí v nosovom spreji môže spôsobiť usadzovanie kryštálikov solí na dne liekovky, ktoré však neznižujú kvalitu obsahu. Tieto kryštálky môžu spôsobiť upchatie mechanizmu rozprašovača (aplikátora). V takom prípade je možné odskrutkovať aplikátor z fľaštičky a ponoriť nasávaciu hadičku do pohára s teplou vodou. Aplikátor niekoľkokrát stlačte tak, aby došlo k nasatiu vody a prečisteniu aplikátora.

Balenie:

25 ml v hnej sklenenej liekovke s mechanickým nosovým rozprašovačom s ochranným krytom.

Dátum poslednej revízie textu: 1. 6. 2023

CE₁₀₂₃

Výrobca:

VINCENTKA a.s., Lázeňské náměstí 165
763 26 Luhačovice, Česká republika

www.vincentka.cz



Obmedzenie teploty skladovania

LOT Číslo šarže



Použiť do dátumu

MD

Zdravotnícka pomôcka



Výrobca



Prečítajte si návod na použitie